


Relief Insert® 2.0

Relief Insert® Walker 2.0

Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Ein Produkt - viele Anwendungsmöglichkeiten: Lagerungsschiene, Walker und Achilles-Walker in einem

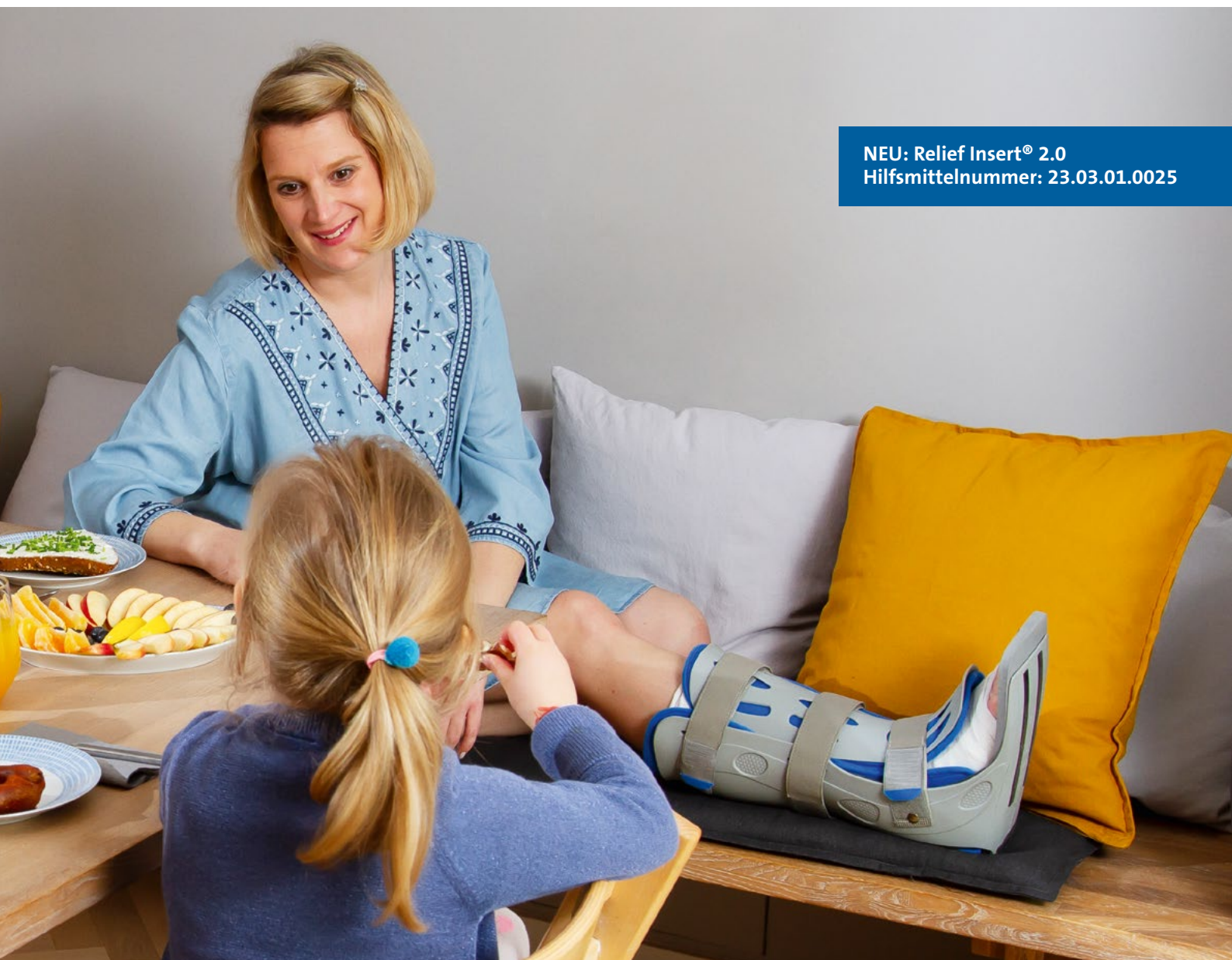

NEU: Relief Insert® 2.0
Hilfsmittelnummer: 23.03.01.0025



DARCO

Anwendung 1

Fußlagerungsschiene | Relief Insert® 2.0

Die Lagerungsschiene dient der Positionierung des Unterschenkels zum Fuß im 90° Winkel. Zur Achillessehnen-Entlastung können die DAW Fersenkeile verwendet werden, um einen vollflächigen Kontakt zum Fuß zu erhalten.

Hilfsmittelnummer: 23.03.01.0025

Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- > Prä- und postoperative Lagerung
- > Spitzfußprophylaxe
- > Posttraumatische Stabilisierung / Ruhigstellung
- > Immobilisierung nach Unfall
- > Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)

Bei Verwendung mit Fersenkeilen:

- > Tendinitis im Achillessehnenbereich
- > Plantarflexionskontraktur von mehr als 10°
- > Verkürzung der Wadenmuskulatur
- > Achillessehnenrupturen
- > Postoperativ bei Achillessehnennaht
- > Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen



Anwendung 2

Unterschenkel-Fußorthese | Relief Insert® Walker 2.0

Durch das Anlegen des Fußteilentlastungsschuhs Relief Dual® Plus wird die Lagerungsschiene zu einer mobilisierenden Unterschenkel-Fußorthese. Der Relief Insert® Walker 2.0 kann zur zusätzlichen plantaren Druckentlastung mit verschiedensten DARCO Weichbettungssohlen angepasst werden. Durch die bereits im Walker eingelegte PegContour® Insole Uni – eine Waben-Weichbettungseinlage mit Fersenkontur und Memory-Foam-Effekt – wird eine optimale Druckumverteilung erreicht. Die einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs) erlauben eine individuelle Anpassung und ermöglichen eine punktuelle Druckentlastung.

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.0070

Indikationen

- > Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- oder Knöchelfrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen
- > Postoperativ nach Weberfrakturen
- > Bei Bandrupturen am Sprunggelenk
- > OSG Arthrodesen
- > Postoperativ nach Haglundexostosen-Abtragungen (bei intakter Achillessehne)
- > TMT 1 Arthrodesen (Lapidusarthrodesen)
- > Nach Metatarsalfaktur-Operationen
- > Nach Hallux Valgus-Operationen
- > Nach Hallux Rigidus-Operationen
- > Nach Hammer- und Krallenzehen-Operationen
- > Frakturen der Phalangen
- > Nach Rückfußoperationen

Im Lieferumfang enthalten

- > Relief Insert® 2.0 Lagerungsschiene
- > Relief Dual® Plus Fußteilentlastungsschuh
- > PegContour® Insole Uni (bereits im Walker eingelegt)



Relief Insert® 2.0
Lagerungsschiene



PegContour® Insole Uni
Universelle Waben-
Weichbettungseinlegesohle



Relief Dual® Plus
Fußteilentlastungsschuh

Anwendung 3

Achilles-Walker | Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Der Relief Insert® Walker 2.0 Achill ist eine Unterschenkel-Fußorthese mit 3-teiligem Keil-Set zur Achillessehnenentlastung. Die Erhöhung und der Spitzfußwinkel kann durch Variieren der angewendeten Keile auf den Patienten angepasst werden. 3 Keile entsprechen 120°. Eine schrittweise Entnahme der Keile ermöglicht den Spitzfußwinkel dem Therapieverlauf anzupassen. Der offene und weiche Fersenbereich gewährleistet eine gute Luftzirkulation.

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.1021

Indikationen

- > Achillessehnenrupturen
- > Postoperativ bei:
 - Achillessehnennaht
 - Haglundexostosen-Abtragungen

Im Lieferumfang enthalten

- > Relief Insert® 2.0 Lagerungsschiene
- > Relief Dual® Plus Fußteilentlastungsschuh
- > DAW (DARCO Achilles Wedges) Fersenkeile



Relief Insert® 2.0
Lagerungsschiene



Relief Dual® Plus
Fußteilentlastungsschuh



DAW (DARCO Achilles Wedges)
Fersenkeile



Vorteile und Eigenschaften

Vorteile


- > 3-in-1: Durch einzelne, abnehmbare Elemente kann das Produkt in vielen Bereichen angewandt werden:
 1. Als Lagerungsschiene z. B. bereits im OP
 2. Als Unterschenkel-Fußorthese mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual® Plus
 3. Als Unterschenkel-Fußorthese mit den DAW Fersenkeilen (3-teiliges Kit)
- > Einfache Verbandkontrolle durch leichtes Abnehmen und wieder Anlegen
- > Zusätzlicher Halt durch optionalen Vorfußgurt (inklusive)
- > Hohe Patientenakzeptanz
 - Weicher Fersenbereich durch Aussparung der Schiene
 - Schlankes Design
 - Geringes Gewicht
 - Hygienisch durch Abnehmen des Schuhs und auswechselbares, bei 60° C in der Maschine waschbares Lining
 - Geringe Wärmeentwicklung

Eigenschaften

- > Zur postoperativen Mobilisierung sowie Lagerung
- > Physiologisches, sicheres Gangbild
- > Nachhaltiges Therapiekonzept in Verbindung mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual® Plus
- > Universell rechts und links tragbar
- > Austauschbare Innensohle

 Rechts = Links

 Geringes Gewicht

 Austauschbare Innensohle


Maximale Stabilität durch individuelle Anpassung

Integrierte Pumpe

Für eine Stabilisierung im Sprunggelenksbereich kann das Volumen der Luftkammern erhöht und somit individuell angepasst werden. Ein Reduzieren der Luft ist durch Betätigen des Ventils möglich.

Automatische Weitenregulierung

Durch die innovative Schalentechnik stellt sich die Orthese automatisch auf den Wadenumfang des Patienten ein. Die daraus resultierende Weichteilkompression erzeugt eine zusätzliche Stabilität im Unterschenkel-Fuß-Bereich. Bei besonders kräftigen Waden kann der Regler zudem ausgehakt werden.

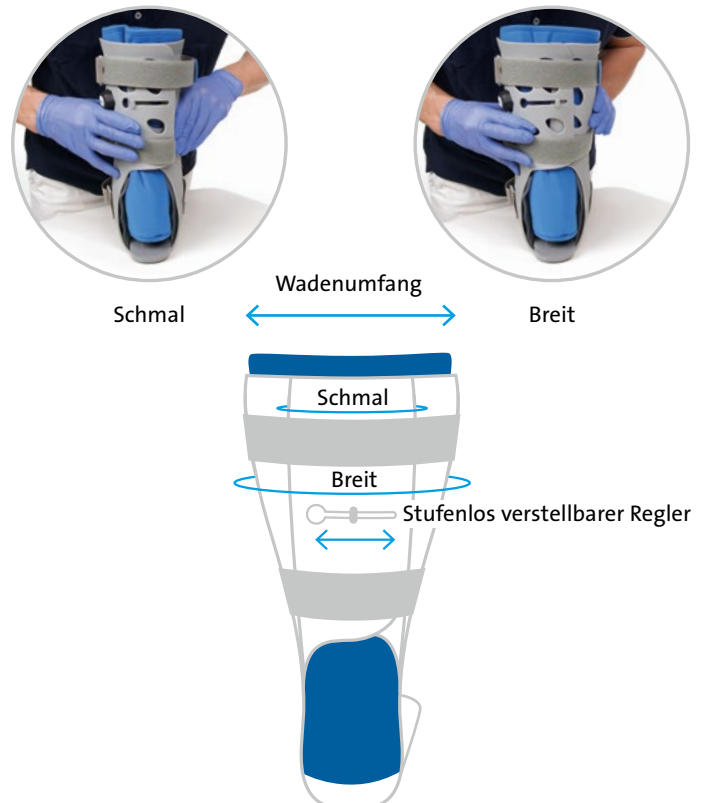

Artikelliste



Relief Insert® 2.0
Fußlagerungssorthe
HiMi-Nr. 23.03.01.0025

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr.	PZN
Farbe: Grau-Blau			
S	37,0 – 41,0	RIX2-1	19402557
M	41,5 – 43,0	RIX2-2	19402540
L	43,5 – 47,0	RIX2-3	19402563



Relief Insert® Walker 2.0
Unterschenkel-Fußorthe
HiMi-Nr. 23.06.01.0070


Größe	Schuhgröße	Art.-Nr.	PZN
Farbe: Grau-Blau			
XS	37,0 – 38,5	RIW2-0	18090274
S	39,0 – 41,0	RIW2-1	18090251
M	41,5 – 43,0	RIW2-2	18090245
L	43,5 – 45,0	RIW2-3	18090216
XL	45,5 – 47,0	RIW2-4	18090268



Relief Insert® Walker 2.0 Achill
Achilles-Walker
HiMi-Nr. 23.06.01.1021


Größe	Schuhgröße	Art.-Nr.	PZN
Farbe: Grau-Blau			
XS	37,0 – 38,5	RIW2W-0	18090328
S	39,0 – 41,0	RIW2W-1	18090305
M	41,5 – 43,0	RIW2W-2	18090297
L	43,5 – 45,0	RIW2W-3	18090280
XL	45,5 – 47,0	RIW2W-4	18090311

Größen und Maße Walker

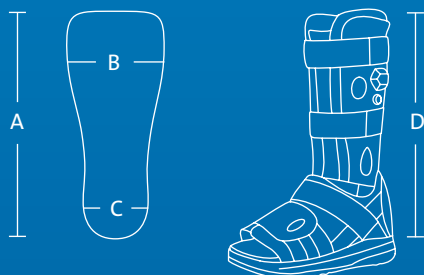

Größe	Schuhgröße	Innensohle in cm			Schafthöhe D	Größe Toe Cap, Innensohle
		A	B	C		
XS	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	38,3 cm	WM
S	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	38,3 cm	MS
M	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	40,3 cm	MM
L	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	44,7 cm	ML
XL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	44,7 cm	MXL

Kompatibel

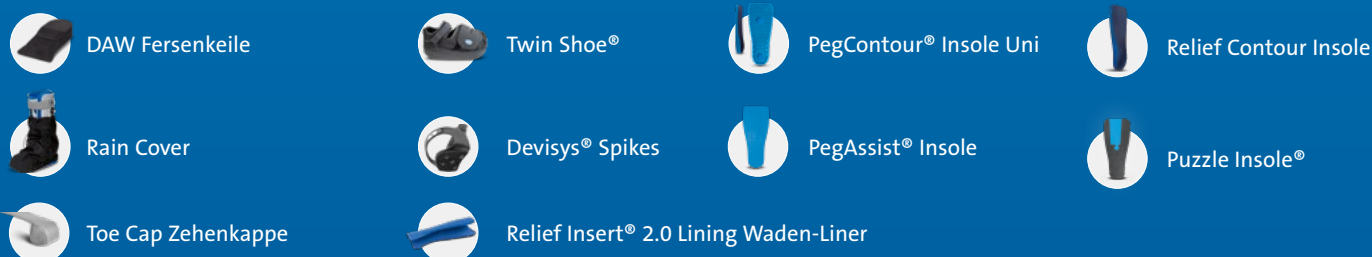

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.



Mehr Informationen